

# MEDDISCOUNT

**Meddiscount Handels-GmbH**  
A-7035 Steinbrunn, Goldbergweg 3-5  
Tel.: +43 2252 77111 Fax: +43 2252 77112  
e-mail: [office@meddiscount.at](mailto:office@meddiscount.at)



Obstetric Suction Cup Application

Vielseitig

Effektiv

Ökonomisch



## Osca Typ-B Vakuum Handpumpe mit Zugkraftanzeiger

Die Vakuum Handpumpe ist ein einfaches, effektives und vielseitig einsetzbares Instrument zur vaginal operativen Entbindung, sie eignet sich für alle fetalen Lagen und hat eine Sectio Zulassung.

### **Vertrieb Österreich**

**Meddiscount Handels-GmbH**

Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn

Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112

[office@meddiscount.at](mailto:office@meddiscount.at)

### **Ihr Berater**

**Michael Ganz**

Tel. +43 650 5 43 44 45

[m.ganz@meddiscount.at](mailto:m.ganz@meddiscount.at)

CE 0123, Class IIa

Hersteller: Beijing HangTian KaDi Technology R&D Room 301, Building No.13-15 Jing Sheng Nan Er Street  
Thongzou District 101102Beijing-People's Republic of China



## Funktionsprinzip

Die Osca Typ-B Vakuum-Handpumpe mit Zugkraftanzeige ist ein einfaches, effektives und vielseitig einsetzbares Instrument zur vaginal operativen Entbindung und ermöglicht eine manuelle optische Kontrolle der ausgeübten Zugkraft auf den Flexionspunkt.

Der in der Mitte befindliche Zugschlauch ermöglicht eine optimale Positionierung und ist somit für alle fetale Lagen inkl. Sectio geeignet.

Der Bediener kann somit die Tastempfindung der Zugkraft mit einem Anzeigewert in Beziehung setzen, was vor allem für Übungszwecke sehr hilfreich ist.

Sobald die Glocke richtig positioniert ist, erzeugt der Anwender mit Pumpbewegungen über die Handpumpe ein Vakuum, welches auf die Kopfhaut wirkt und über eine farbcodierte Vakuum Anzeige kontrollierbar ist. Dies hat zur Folge, dass der Kopf des Kindes stabilisiert und sicher fixiert wird.

Das flexible Zugseil ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit und Orientierung sowie effektive Traktion, während der mütterlichen Kontraktion.

## Produkteigenschaften:

- Handgriff für eine ergonomische und effiziente Anwendung mit farbcodierter Vakuum Anzeige.
- manuelle optische Zugkraftanzeige.
- Integrierter Druckknopf für schnelles Lösen des Vakuums.
- Flexibler Schlauch mit Zugseil in der Mitte der Glocke befestigt. Seine Flexibilität ermöglicht einen Zugwinkel von 180°. Er verfügt über 2 Markierungen (6cm und 11cm), mit den der Einführabstand sowie die Höhe des Köpfchens beurteilt werden können.
- Latexfreies System, DEHP-frei (Di-2-ethylhexylphthalat), BPA-frei (Bisphenol A)
- Einzeln steril verpackt.
- 1VE = 5 Stück



### Vertrieb Österreich

**Meddiscount Handels-GmbH**  
Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn  
Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112  
office@meddiscount.at

### Ihr Berater

**Michael Ganz**  
Tel. +43 650 5 43 44 45  
m.ganz@meddiscount.at